


Pen-süstli
otsik

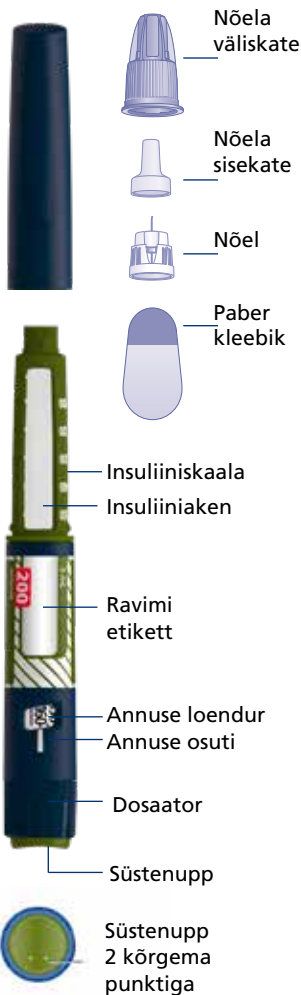

FlexTouch® 200 pen-süstli ja nõela näidis

FlexTouch® 200 pen-süstli juhend

- Pen-süstel sisaldab 600 ühikut insuliini. **Maksimaalne valitav annus on 160 ühikut, annuseid saate valida kahe ühiku kaupa.**
- Pen-süstli annuse loendur näitab insuliini ühikute täpset arvu. **Ärge tehke mingeid annuse ümberarvutusi.**
- Pen-süstel on mõeldud kasutamiseks NovoFine® ühekordsete nõeltega, mille pikkus on kuni 8 mm.

PEN-SÜSTLI ETTEVALMISTAMINE

- Kontrollige etiketil olevat ravimi nime ja kontsentratsiooni.
- Eemaldage pen-süstli otsik.
- Võtke uus nõel, rebige nõelalt paberkleebik ära. Lükake nõel otse pen-süstlile ja keerake, kuni see on tugevalt kinnitunud.
- Tõmmake ära nõela väliskate ja hoidke see alles. Eemaldage ja visake ära nõela sisekate.

ETTEVALMISTUSED SÜSTIMISEKS

Enne alustamist kontrollige insuliini väljavoolu.

- Dosaatorit keerates valige 2 ühikut. Veenduge, et annuse loenduril on näha 2.
- Hoidke pen-süstlit nõelaga ülespoole. Koputage pen-süstli ülaosa paar korda õrnalt, et lasta võimalikel õhumullidel üles tõusta.
- Vajutage ja hoidke süstenuppu all, kuni number 0 on kohakuti annuse osutiga. Nõela otsa peab ilmuma insuliinitilk.

ANNUSE VALIMINE

- Veenduge, et annuse loendur osutab numbrile 0.
- Keerake dosaatorit ja valige soovitud annus, järgides arsti või meditsiiniõe juhiseid.

ANNUSE SÜSTIMINE

- Sisestage nõel nahka nii, nagu arst või meditsiiniõde teile näidanud on. Veenduge, et näete annuse loendurit.
- Vajutage ja hoidke süstenuppu all, kuni annuse loendur jõuab tagasi väärtuseni 0.
- Jätke nõel naha alla veel vähemalt 6 sekundiks.
- Tõmmake nõel ja pen-süstel otse nahast välja. Pange nõelale tagasi väliskate, keerake nõel lahti ja visake ettevaatlikult ära.

Kasutage igaks süsteks alati uut nõela. See vähendab saastumise, nakkuse, insuliini lekkimise, nõelte ummistumise ja ebatäpse annustamise riski.

Enne ravimi kasutamist lugege ravimi pakendi infolehte.

Uus nõel igaks süsteks, et süstimine oleks valutu ja turvaline

NovoFine®
nõelad
30 aastat
arendamist ja
innovatsiooni



Mugav

Peenike
Läbimõõt 0,23/0,25 mm või 0,30 mm
Võimalikult valutu (mitmeastmeliselt teritatud)



Tugev

Unikaalne disain
Maksimaalselt sileda pinnaga
(elektropoleeritud, silikoonkattega)



Universaalne

Sobivad kõigi insuliini süstevahenditega



NovoFine® 32G 4 mm
NovoFine® 30G 8 mm

NovoFine® nõelteil on Haigekassa soodustus
Kabis 100 nõela



Meditsiiniseade.
Novo Nordisk A/S Eesti filiaal, Paldiski mnt 29, Tallinn 10612
NovoFine® on Novo Nordisk A/S registreeritud kaubamärk.
© 2019 Novo Nordisk A/S EE/40/2019

novofine®