



INSULIINI SÜSTEPIIRKONNAD

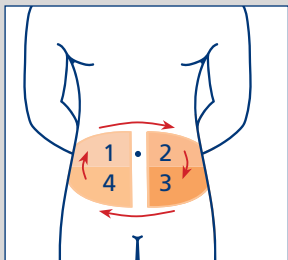


Kõhupiirkonda on soovitatav süstida lühitoimelist insuliini

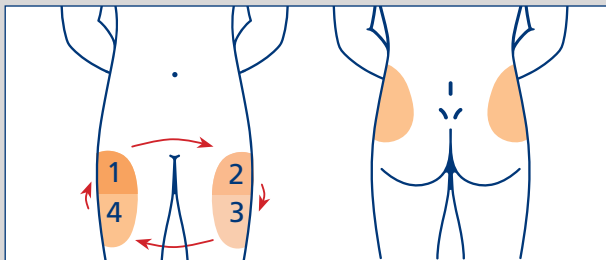

Reie- ja tuharapiirkonda on soovitatav süstida pikatoimelist ehk basaalsuliini


Süstekohti tuleb regulaarselt vahetada!

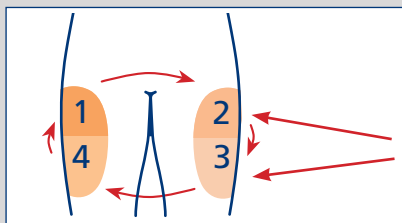


Korduval süstimisel samasse kohta võib süstekoht muutuda punaseks ja tursuda, võivad tekkida nahamuutused! Küsige täiendavat infot oma raviarstilt.

SÜSTETEHNIKA


kasutades 4 mm nõela

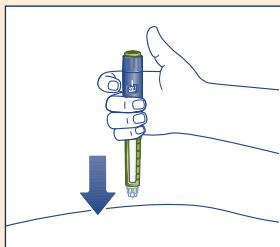

Süsti nahaga 90° nurga all

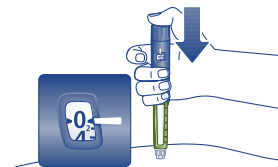

Vajuta süstenuppu.
Skaala jookseb nulli

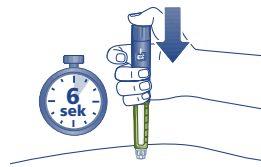

Süstenuppu all hoides
hoia nõela naha all
veel 6 sek

Uus nõel igaks süsteks, et süstimine oleks valutu ja turvaline

***Haigekassa: Rohkem
nõelu insuliinravi saavale
diabeetikule!**
Alates 1. jaanuarist 2021
II tüüpi diabeedi haigele,
kes saab raviks insuliinisüste,
kuni 700 nõela
kalendripoolaastas



Võimalikult valutu

- Peenike
- Mitmeastmeliselt teritatud
- Maksimaalselt sileda pinnaga (elektropoleeritud, silikoonkattega)



Tugev

- Unikaalne disain, mis tagab tugevuse



Universaalne

- Sobivad kõigi insuliini pen-süstlitega
- 4 mm nõel sobib igaühele



NovoFine® 32G 4 mm

NovoFine® 31G 6 mm

NovoFine® 30G 8 mm

NovoFine® nõeltel on Haigekassa soodustus
Karbis 100 nõela



*<https://www.riigiteataja.ee/akt/116122020016>

Meditsiiniseade. Vajadusel konsulteerige arsti või apteekriga. Novo Nordisk A/S Eesti filiaal, Paldiski mnt 29, Tallinn 10612.

NovoFine® on Novo Nordisk A/S registreeritud kaubamärk.

© 2021 Novo Nordisk A/S EE21NFE00007

novofine®