

Uus nõel igaks süsteks, et süstimine oleks valutu ja turvaline

***Haigekassa:
Rohkem nõelu
insuliinravi saavale
diabeetikule!**

Alates 1. jaanuarist 2021
II tüüpi diabeedi haigele,
kes saab raviks süstitavaid
diabeediravimeid,
kuni 700 nõela
kalendripoolaastas



Võimalikult valutu

- Peenike
- Läbimõõt 0,23/0,25 mm
- Mitmeastmeliselt teritatud
- Maksimaalselt sileda pinnaga (elektropoleeritud, silikoonkattega)



Tugev

- Unikaalne disain, mis tagab tugevuse



Universaalne

- Sobivad kõigi insuliini pen-süstlitega
- 4 mm nõel sobib igaühele



NovoFine® 32G 4 mm

Saadaval ka 6 ja 8 mm NovoFine® nõelad

NovoFine® nõeltel on Haigekassa soodustus
Karbis 100 nõela

[*https://www.riigiteataja.ee/akt/116122020016](https://www.riigiteataja.ee/akt/116122020016)

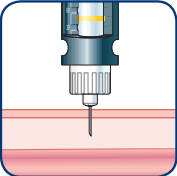
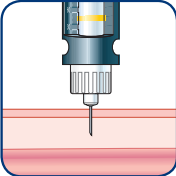
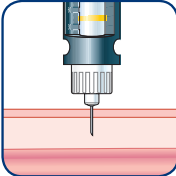
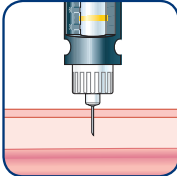
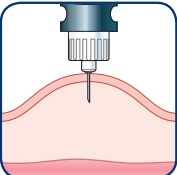
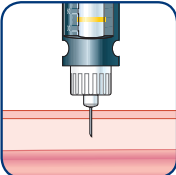
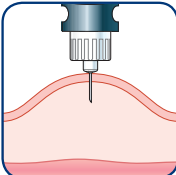
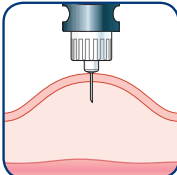
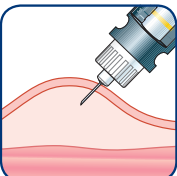
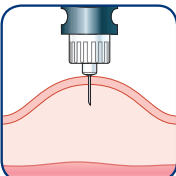


Meditsiinisead. Vajadusel konsulteerige arsti või apteekriga. Novo Nordisk A/S Eesti filiaal, Paldiski mnt 29, Tallinn 10612. NovoFine® on Novo Nordisk A/S registreeritud kaubamärk.

© 2021 Novo Nordisk A/S EE21NFE00001

novofine®

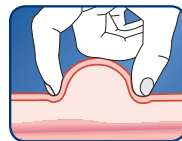
novofine® süstimisõpetus

	Täiskasvanu	Täiskasvanu	Laps	Laps
	Sale	Normaalkaalus ja rasvunud	Sale	Normaalkaalus ja rasvunud
4 mm				
5 mm või 6 mm				
8 mm			Ei soovitata. ¹	Ei soovitata. ¹

4-mm nõel on piisavalt pikk, et läbistada nahk ning ulatuda nahaalusesse koesse, vähendades nii lihasesisese süste riski. Seega peetakse seda kõige ohutumaks nõelaks nii lastele kui täiskasvanuile, sõltumata vanusest, soost, rahvusest või kehamassiindeksist. Nahavolti ei ole vaja tõsta.¹

Juhul, kui kasutate siiski pikemat kui 4-mm nõela, on optimaalne tegevusjärjekord järgmine:¹

1. tõstke ettevaatlikult nahavolt,
2. sisestage nõel 90-kraadise nurga all ja süstige ravim,
3. hoidke nõela naha all veel vähemalt 6 sekundit, et kindlustada kogu annuse süstimine,
4. tõmmake nõel sama nurga all naha seest välja,
5. vabastage nahavolt,
6. utiliseerige kasutatud nõel.



Nõelad on ühekordseks kasutamiseks kuna peale kasutamist ei ole nad enam steriilsed. Samuti võib peale süstimist nõelas olev ravim kuivades nõela ummistada.¹